

理美容室の
3D新習慣
MASK

— 貼る使い捨てマスクパッド —

男性も使えるサイズ!

Point 1

3Dタイプで
フィット感アップ!

Point 2

3層フィルター構造

Point 3

微粒子を効果的に
フィルタリング

Point 4

個包装で衛生的



〈 3Dマスクパッドの特徴 〉

- サイズ: 約13cm×13cm
- カラー: ホワイト
- 40パック入



肌用シール使用*
(アレルギーテスト済み)

*使用中、肌に異常が生じた場合は、使用を中止してください。
異常が改善されない場合は、専門医等へご相談ください。

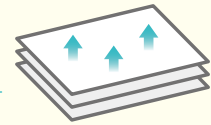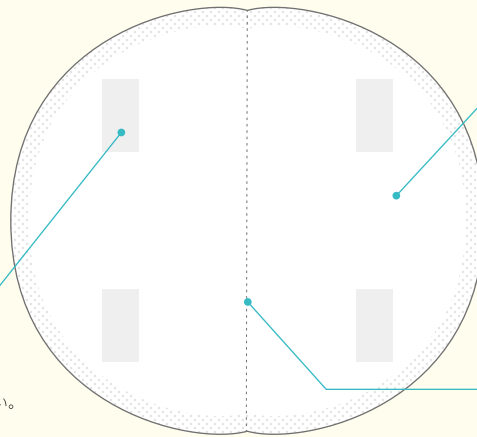

3層フィルター構造




顔の輪郭に合わせた
デザインでフィット


使用方法



1. マスクパッドの着用前に、シールを貼る部分(頬)の皮脂や汗、化粧等を拭き取ります。

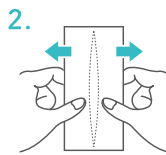


2. 個包装のミシン目部分を開けて、マスクパッドを取り出します。

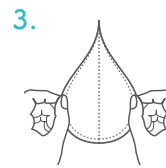


3. 折り畳まれているマスクパッドの側面を剥がして開きます。

こちら側から
剥がれます

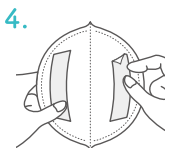

4. マスクパッドに付いているシールの剥離紙をはがします。

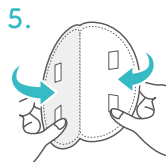

5. シールが貼ってある面が内側になるように、マスクパッドを折り返します。



6. マスクパッドを口、鼻を覆うように貼り付けます。その際、口元に少し余裕をもたせて貼ってください。

3D新習慣マスク

[JAN] 4582171845070
[容量] 40パック



●お問い合わせ